

Hygoprint dato-label pistol

Hygoprint dato-labels er beregnet til - efter succesfuld autoklaving - at blive sat på de steriliserede emballager (fx autoklaveposer og kassetter).

I henhold til NIR skal steriliseringsdato påføres, og man skal kende de steriliserede artiklers holdbarhed. Med Hygoprint label'en er der mulighed for registrering af op til fem parametre – se forklaring herunder.



Sterilisering dato:		Brug før:	
22 FEB 07		22 MAR 07	
Batch nr:	Steri-nr:	Pers.-nr:	
124	687	90	

Dato for sterilisering.

Holdbarhedsdato.

Sterilisering dato:		Brug før:	
22 FEB 07		22 MAR 07	
Batch nr:	Steri-nr:	Pers.-nr:	
124	687	90	

Kørselsnummer for autoklavingen. Dette nummer fremgår af autoklavens display efter succesfuld kørsel.

Hvilken autoklave er blevet brugt. Har man fx to autoklaver på klinikken skrives 1 eller 2.

Personalenummer (sv.t. initialer) på den person der har godkendt at autoklaven har kørt uden problemer.