

3M™ Sterilization Assurance

Til 3M™ Attest™ Auto-reader 490* og 3M™ Attest™ Super Rapid biologisk indikator (BI) 1492V**

1	Afkøl		Lad BI afkøle minimum 10 minutter
2	Placer & Tryk		Placer BI i en inkubationsbrønd, tryk BI HÅRDT ned for at lukke låget og knuse ampullen med vækstmediet.
3	Fjern BI & Knips		Fjern BI og knips med fingrene på BI for at sikre at det lille vækstmedie siver ned i væstkammeret (nederste del af BI).
4	Inspicér		Tjek at vækstmediet er sivet ned i væstkammeret i bunden af ampullen.
5	Retur til inkubation		Returnér den aktiverede BI i inkubationsbrønden. Tjek displayet for at sikre at BI er korrekt placeret. Resterende inkubationstid, i minutter, vises direkte i displayet nedenfor brønden, hvori BI inkuberes, således indikeres det at inkubationen er igang. FJERN IKKE BI fra inkubationsbrønden før (+) eller (-) symbolet indikerer at testen er afsluttet.
6	Aflæs resultatet		Se på displayet under den inkuberede BI for at aflæse negativt (-) eller positivt (+) resultat. Kontrol BI skal give et positivt (+) resultat. Et negativt resultat for en BI, som har været udsat for steriliseringsprocessen, efter 24 minutter inkubation indikerer en godkendt steriliseringsproces. Et positivt resultat for en BI, som har været udsat for steriliseringsprocessen indikerer at steriliseringsprocessen er mislykket, og der bør handles straks.
7	Dokumentér		Dokumentér resultat for begge test (den steriliserede BI) og kontrol BI (den ikke steriliserede).