

TERUMO DENTAL NEEDLE

Dentalkanyle med skruegevind.



MISAWA MEDICAL INDUSTRY CO, LTD. 1320-5, Nagatoro, Kasama-shi, Ibaraki-ken, 309-1712, Japan



Emergo Europe, Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague the Netherlands



TERUMO EUROPE N.V. Interleuvenlaan 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM

Til tubulesprøjter. Steril og pyrogenfri i uåbnet og ikke-beskadiget enkeltpakning (kanylehylster).

Forsigtighedsforanstaltninger:

- Bøj ikke kanylen før brug, da dette kan resultere i brud på kanylen og forårsage skade på patienten.
- Må ikke anvendes hvis kanylehylsteret eller selve kanylen er beskadiget eller er blevet tilsmudset.
- Kanylen skal anvendes umiddelbart efter at kanylehylsteret er åbnet.
- Bortskaffes sikkert efter engangsbrug i overensstemmelse med lokale regler for at undgå risiko for infektion.

Symbolforklaring



Medicinsk udstyr.



Steriliseret med ethylenoxid.



Må ikke genanvendes.



Temperaturbegrænsning.



Opbevares tørt.



Beskyttes mod sollys.



Pyrogenfri.



Fabrikant.



Autoriseret repræsentant inden for EU-området.



Importør.



Artikelnummer.



Batchkode.



Produktionsdato.



Anvendes inden.



Unik udstyrsidentifikation.

LONG

Lang.